

## Remplissage d'un Portable HELIOS®

Une instruction qui démontre pas à pas comment remplir un Portable FREELOX sur une Réserve FREELOX 2.  
Vous trouvez les instructions détaillées dans le mémento CARBAGAS *Utilisation Portable HELIOS*.

1



Avant de remplir le portable, enlevez le capuchon du raccord de remplissage de la Réserve, nettoyez et séchez le compartiment de remplissage et le raccord avec un chiffon non peluchant.

2




Séchez le raccord femelle du Portable.

3



Poser soigneusement le Portable à la verticale dans le compartiment de remplissage.  
Le cas échéant baisser la fourchette du mécanisme de déclenchement\*.

4

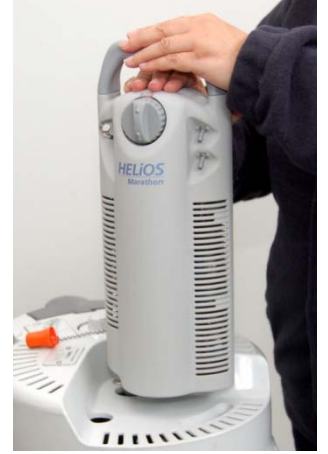

Effectuer une puissance légère au Portable et le tenir. L'appareil ne s'enclenche pas.

5



Tirer le levier d'évent et remplir le Portable:  
L'appareil sera tenu en vertu d'une pression légère sur le levier d'évent baissé.  
Pour éviter que la valve de remplissage ne gèle, veuillez relâcher brièvement le levier d'évent régulièrement, après chaque minute, durant le remplissage.

6



Remplir, jusqu'à ce que de la brume blanche s'apprête à couler des ouvertures d'aération du Réservoir.  
L'appareil « tousse ».

7



Après le remplissage, enlever le Portable le cas échéant par une traction légère à la poignée.

8



Contrôlez le niveau de remplissage à l'aide du peson à ressort.

\* veuillez s'il vous plaît lire le document DE-25.018f Manipulation du portable HELIOS.

Votre contact chez CARBAGAS :  
Care Center Homecare, Tél. 0800 428 428