

Bedienung Portable FREELOX

Diese Kurzanleitung ermöglicht es dem Benutzer, das Medizinprodukt rasch in Betrieb zu nehmen und sicher zu bedienen. Für detaillierte Informationen verweisen wir auf das Original-Benutzerhandbuch des Herstellers, welches im Internet publiziert ist. Wir weisen darauf hin, dass dieses Benutzerhandbuch verbindlich ist.

1 Gerätetypen



FREELOX 1.2 l



FREELOX 0.5 l

2 Bedienung

2.1 Abfüllung des portablen Gerätes



1
 Vor dem Füllen des Portables dessen Bodenabdeckung entfernen. Allenfalls die nasse Filzeinlage gegen eine trockene austauschen.



2
 Die Schutzkappe vom Füllanschluss der Reserve abnehmen. Das Füllfach mit einem fusselfreien Lappen sauberwischen und den Füllanschluss trocknen.



3
 Trocknen Sie den Füllanschluss des Portables.



4
 Das Portable sorgfältig senkrecht von oben in die Aussparung der Reserve stellen. Dazu gegebenenfalls die Gabel des Auslösemechanismus* etwas absenken.



5
 Leichten Druck auf das Portable aufbringen und halten. Das Gerät rastet nicht ein, es wird jedoch bereits durch den Druck auf den abgesenkten Füllhebel (Schritt 6) in Position gehalten.



6
 Den Entlastungshebel am Portable absenken und füllen. Max. Hebel-Neigung: siehe Etikette am Gerät. Die Bildung von weissem Nebel ist normal.



7
 Füllen, bis der weisse Nebel schwallweise aus den Lüftungsschlitzen der Reserve quillt. Das Portable „hustet“.



8
 Nach dem Füllen das Portable gegebenenfalls durch leichten Zug am Tragegriff lösen. Kontrollieren Sie den Füllstand anhand der elektronischen Füllstandsanzeige.


* Die neueste Generation der FREELOX Reserve verfügt über einen Auslösemechanismus, welcher dazu dient, das Portable im Falle des Festfrierens mittels kräftigen Pressens auf den Knopf von der Reserve zu lösen.

Der Mechanismus kann jedoch beim Füllen eines Portables im Wege sein.



2.2 Ablesen der Füllstandsanzeige

Die Segmente der Anzeige geben den Füllstand des Behälters wieder:

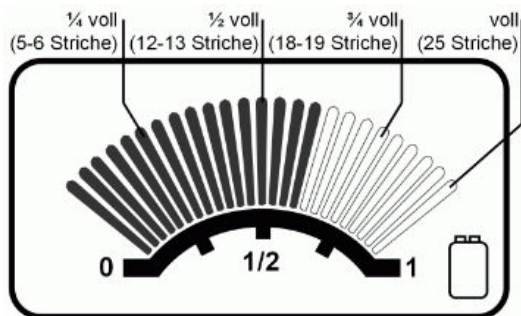


Wenn das Batteriesymbol erlischt, muss die Batterie ausgewechselt werden (vgl. Abschnitt 2.5).

2.3 Montage der Sauerstoffbrille

Stecken Sie die Anschlussmuffe der Sauerstoffbrille auf den Schlauchanschluss.


2.4 Regulierung des Durchflusses

Der Durchfluss lässt sich mit dem Drehknopf auf der Oberseite des Portables regeln.

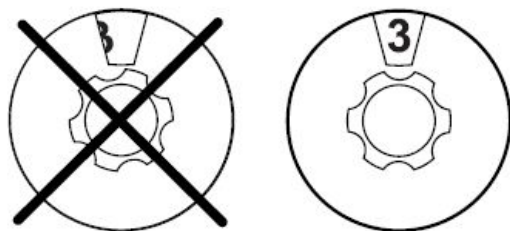

Achtung: Position immer **einrasten** lassen! Bei Zwischenstellungen kann der Durchfluss unterbrochen werden.

2.5 Wechsel der Batterie

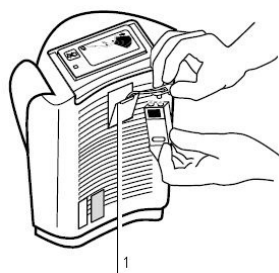

Zum Wechsel der Batterie im Portable FREELOX die Batteriefach-Abdeckung mit einem Schraubenzieher oder einer kleinen Münze aushebeln.

3 Autonomie

In der folgenden Tabelle geben wir Ihnen eine Übersicht über die Autonomie, welche Sie mit einem vollen Portable idealerweise erreichen.

Einstellung	Portablegrösse	
	1.2 l	0.5 l
Durchfluss (l/min. gasförmig)	0.25	30
	0.5	20
	1	12
	1.5	8½
	2	6½
	2.5	5½
	3	4½
	4	3½
	5	3
	6	2½
7	2	

Angaben Stunden

4 Reinigung und Desinfektion

4.1 Reinigung

Die Behälter dürfen nur äusserlich gereinigt oder desinfiziert werden. Es dürfen keine starken Scheuermittel eingesetzt werden. Allenfalls etwas Geschirrspülmittel verwenden. Mit Wasser nachwischen.

Achtung: Es dürfen keine entflammaren Lösungsmittel (Aceton, Benzin, Petrol, Nitroverdünner etc.) zur Reinigung verwendet werden (vgl. Sicherheitsmerkblatt)!

4.2 Filzeinlage

FREELOX Portables sind im Fuss des Behälters mit einer Filzeinlage ausgestattet. Diese sollte regelmässig gewaschen und getrocknet werden, um Schimmelbildung und Geruchsentwicklung zu vermeiden.

Entfernen Sie dazu die Abdeckung des Behälterfusses (Bodendeckel), entnehmen Sie die feuchte Filzeinlage und legen Sie eine trockene ein.

Ihr Betreuer gibt Ihnen bei Bedarf neue Einlagen ab.

5 Funktionsstörungen

Abhilfemassnahmen zu möglichen Funktionsstörungen entnehmen Sie bitte dem Haupt-Merkblatt Bedienung der Geräte.

CARBAGAS AG
Homecare
Waldeggstrasse 38
3097 Liebefeld-Bern

Tel. 0800 428 428 oder 031 978 78 82 (für Auslandsanrufe)

Fax 031 978 78 03

e-mail info@carbegas-homecare.ch