

Respireo

Hospital F

Non Vented Disposable



Einmalverwendung:
bis zu 7 Tage
pro Patient

Die Klinikmaske mit dem Komfort einer Homecaremaske




- ermöglicht nicht-invasive, komfortable Beatmung
- zeitsparende und sichere Anwendung durch wenige Komponenten
- Einwegartikel: erspart aufwändige hygienische Aufbereitung und Dokumentation
- in 3 Größen erhältlich
- Anpass-Schablone griffbereit auf der Verpackung
- Maske komplett mit Kopfband und Maskenkissen

Respireo


Hospital F

Vented Disposable

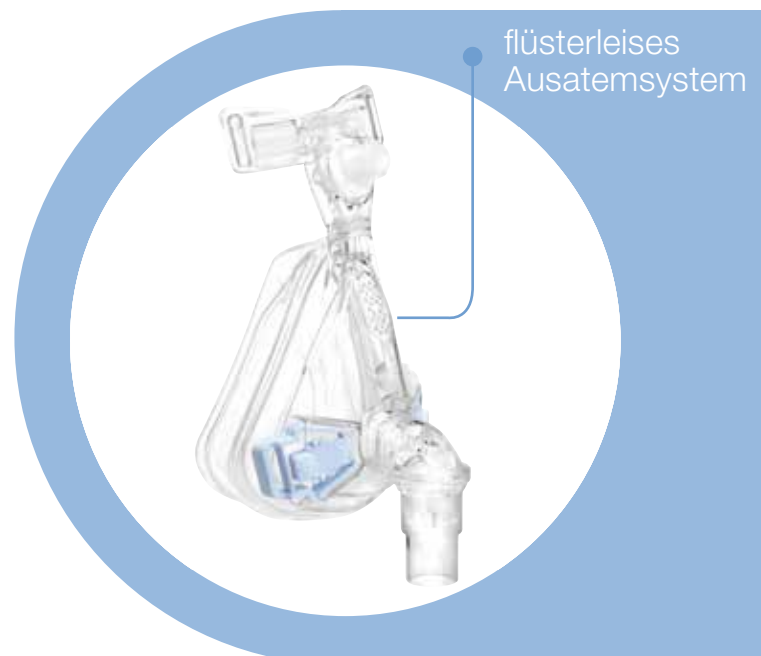


- Die bewährte Respireo Hospital F als **vented**-Version
- Identische einfache Anwendung (siehe Rückseite)


Schnellanleitung

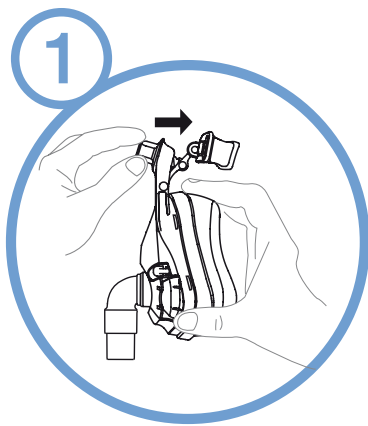

Stirnstütze mittels Drehknopf vollständig zum Patienten hinbewegen.

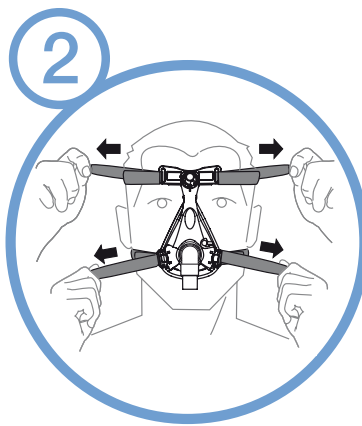

Kopfbänder nur leicht anlegen. Beatmung anschließen und Stirnstütze anpassen. Wenn nötig, Bänder nachkorrigieren.

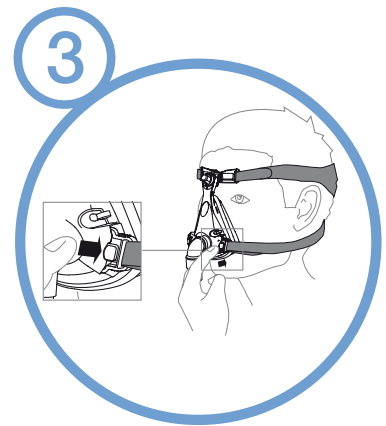

Einfaches Ablegen der Maske durch Schnellverschluss.

- biokompatibles medizinisches Silikon
- frei von Phtalaten
- frei von Latex

Kompatibilität

	Monnal T50	Monnal T60	Monnal T75	Extend	Beatmung mit Expirationsventil	Leckage-Beatmung
Respireo Hospital Non Vented	✓	✓	✓	✓	✓	X
Respireo Hospital Vented	X	X	X	X	X	✓

Artikelnummern

KM222100	Respireo Hospital F Non Vented Disposable – Größe S
KM222200	Respireo Hospital F Non Vented Disposable – Größe M
KM222300	Respireo Hospital F Non Vented Disposable – Größe L
KM226400	Respireo Hospital F Vented Disposable – Größe S
KM226500	Respireo Hospital F Vented Disposable – Größe M
KM226600	Respireo Hospital F Vented Disposable – Größe L

Respireo
Hospital F
Non Vented Disposable

Respireo
Hospital F
Vented Disposable



Bitte Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.
Medizinprodukt Klasse IIa CE 0051.

Hergestellt durch Air Liquide Medical Systems Spa. Vertrieb durch Air Liquide Medical Systems SA.