

# ARGON CHIRURGICAL



Gas für die Anwendung  
mit Argonplasma-  
Koagulations-Geräten

Zusammensetzung  
100% Argon (Ar) bei  
einem Druck von  
200 bar bei 15°C.

**ARGON CHIRURGICAL** wird bei verschiedenen elektrochirurgischen Verfahren im Zusammenhang mit Geräten für die Argon-Plasma Koagulation (APC) eingesetzt. Es erlaubt dabei eine schnelle, effektive Koagulation von Blutungen, auch von Blutungen grossflächiger Areale.

#### **Konformitätserklärung**

CARBAGAS erklärt, dass ARGON CHIRURGICAL als Medizinprodukt der Klasse IIa im Einklang mit der Technischen Dokumentation hergestellt wird und den einschlägigen Anforderungen der harmonisierten und schweizerischen Normen für Medizinprodukte entspricht.

Lesen Sie die **Gebrauchsinformation** sorgfältig durch und beachten Sie die Anwendungshinweise bevor Sie dieses Medizinprodukt anwenden.



## Argon Chirurgical – Gas für die Anwendung mit Argonplasma-Koagulations-Geräten

### Zusammensetzung

100% Argon (Ar) bei einem Druck von 200 bar bei 15°C.

#### Wichtige Informationen vor dem Gebrauch:

- ARGON CHIRURGICAL kann durch Verdrängen der Luft in kleinen geschlossenen Räumen eine gefährliche Umgebungsluft (Sauerstoffgehalt < 19 %) schaffen und zu Asphyxie führen.
- ARGON CHIRURGICAL darf nicht eingeatmet werden. Flaschen mit der gleichen Schulterfarbe können andere Gase enthalten. Die Etikette am Flaschenkörper ist der einzige Hinweis für die Identifikation des Inhaltes der Flasche.
- ARGON CHIRURGICAL als Medizinprodukt ist nicht steril; reinigen Sie den Flaschenkörper und das Flaschenventil vor dem Gebrauch und folgen Sie bitte den Empfehlungen des Geräteherstellers für die Plasma-Koagulation.
- Benutzte Räume be- und entlüften. Flaschen vor Stössen, dem Umfallen, vor Hitze und brennbaren Materialien schützen.
- Benutzen Sie ARGON CHIRURGICAL mit passendem Material, damit dieses nicht beschädigt wird und mit anderem verwendeten Material kompatibel ist.



#### ARGON CHIRURGICAL in 5l Alu-Flaschen

Inhalt in m <sup>3</sup> :	1
Fülldruck:	200 Bar
Anschluss:	W21.8 x 1/14" rechts mit Restdruckventil
Flaschenschulter :	smaragdgrün
Flaschenkörper:	weiss

#### Die Qualitätsmerkmale auf einen Blick

- 1 Pharmazeutische Etikette mit CE-Kennzeichnung CE1250
- 2 ADR-Etikette
- 3 Barcode für Rückverfolgbarkeit gemäss Anforderungen der Materiovigilance
- 4 Chargenetikette mit Verfallsdatum
- 5 Gebrauchsinformation



#### Hauptsitz

Hofgut / Postfach 128  
3073 Gümligen  
Tel. 031 950 50 50  
Fax 031 950 50 51  
info@carbagas.ch

Carbegas Healthcare: Für die beschriebene Anwendung treten wir als pharmazeutisches Unternehmen und Hersteller von medizinischen Gasen als Ihr Partner auf und garantieren die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften gestützt auf das Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (HMG) und die Gute Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice: EU-GMP-Leitfaden, Band 4 insbesondere Anhang 6 „Herstellung von Medizinergasen“). Die bei ARGON CHIRURGICAL zur Anwendung gelangenden Verfahren und Prozesse entsprechen den Anforderungen der der Medizinprodukteverordnung des schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic. Mit ARGON CHIRURGICAL erhalten Sie ein medizinisches Gas, welches nach den aktuellsten gesetzlichen Anforderungen produziert und vertrieben wird.