

## Verwendungshinweise OPTIO VARIUS

Um Sauerstoff aus Druckgasflaschen entnehmen zu können, wird eine Entnahmearmatur wie zum Beispiel der OPTIO VARIUS benötigt.

### 1 Montage

Der OPTIO VARIUS ist mit einer O-Ring-Dichtung und einem Handanzug ausgestattet. Der Handanzug darf nicht mit Schraubenschlüssel oder Zange angezogen oder gelöst werden! Dies würde den Dichtungsring zerstören.

Ziehen Sie die Rändelmutter der Armatur mit der Hand fest. Durch den Druckaufbau beim Öffnen des Flaschenabsperrentils quillt der Dichtungsring auf, wird fest in seinen Sitz gepresst und garantiert optimale Dichtigkeit.

### 2 Demontage

Solange die Armatur unter Druck steht (offenes Flaschenventil), kann sie nicht manuell von der Flasche gelöst werden, ohne dass der Dichtungsring zerstört wird!

Gehen Sie zum Lösen des OPTIO VARIUS wie folgt vor:

1. Schliessen Sie das Absperrventil der Flasche
2. Entlasten Sie den OPTIO VARIUS, indem Sie für einige Sekunden den Durchflussregler öffnen
3. Lösen Sie die Rändelmutter manuell und ohne Zuhilfenahme eines Werkzeugs vom Ausgangsanschluss des Absperrventils der Flasche

### 3 Einstellung eines Durchflusses

Beim OPTIO VARIUS wird der Durchfluss mittels einer Lochblende geregelt. Dadurch ist keine kontinuierliche Abstufung möglich. Die Dosierungsstufung ist jedoch langjährig erprobt und entspricht den in der Medizin üblichen Dosierungen.

Achten Sie darauf, dass im Gebrauch der Regler immer auf einer Rastposition steht. Andernfalls kann der Gasdurchfluss unterbrochen werden!



CARBAGAS AG  
Homecare  
Waldeggstrasse 38  
3097 Liebefeld-Bern

Tel. 0800 428 428 oder 031 978 78 82 (für Auslandsanrufe)  
Fax 031 978 78 03

e-mail [homecare.info@carbegas.ch](mailto:homecare.info@carbegas.ch)