

Bedienung Hi Flow Stroller

1 Gerät



Seitenansicht



Draufsicht

2 Bedienung

2.1 Abfüllung des portablen Gerätes

Die Füllung dauert zwischen 60 und 120 Sekunden.



Entfernen Sie die Schutzkappe vom Füllanschluss des Reservoirs. Wischen Sie vor dem Füllen das Füllfach des Reservoirs mit einem fusselfreien Lappen sauber und trocknen Sie die Füllanschlüsse von Reservoir und Portable. Es ist nicht erforderlich, den Boden des Portables zu öffnen.



Setzen Sie das Portable behutsam senkrecht auf den Füllanschluss des Reservoirs. Dazu gebe-nenfalls die Gabel des Auslösemechanismus* etwas absenken.



Leichten Druck auf das Portable aufbringen und halten. Das Gerät rastet nicht ein.

5



Den Entlastungshebel am Portable horizontal um 90° kippen und füllen, bis aus den Lüftungsschlitzen des Reservoirs schwallweise weisser Nebel quillt. Das ist völlig normal. Das Portable sofort nach dem ersten „Husten“ von der Reserve trennen.

6



7



Nach dem Füllen den Entlastungshebel in die Ursprungsposition zurücklegen und das Portable gegebenenfalls durch leichten Zug am Trageriemen lösen.

8



Prüfen Sie den Füllstand anhand der Füllstands-anzeige (siehe § 2.4).

Achtung: Warten Sie nach dem Füllen mit dem Einsatz des Geräts ca. **10 Minuten**, damit sich der Druck sich stabilisieren kann (Durchflusseinstellung „0“, siehe § 2.4). Damit Eis, welches sich am Portable gebildet hat, schmelzen kann, beträgt die Wartezeit bei wiederholtem Füllen bis **60 Minuten**.

* Die neueste Generation des FREELOX Reservoirs verfügt über einen Auslösemechanismus, welcher dazu dient, das Portable im Falle des Festfrierens mittels kräftigen Pressens auf den Knopf vom Reservoir zu lösen. Der Mechanismus kann jedoch beim Füllen eines Portables im Wege sein.




2.2 Montage der Sauerstoffbrille

Stecken Sie die Anschlussmuffe der Sauerstoffbrille auf den Schlauchanschluss.

2.3 Regulierung des Durchflusses

Der Durchfluss lässt sich mit dem Drehknopf auf der Oberseite des Portables regeln.

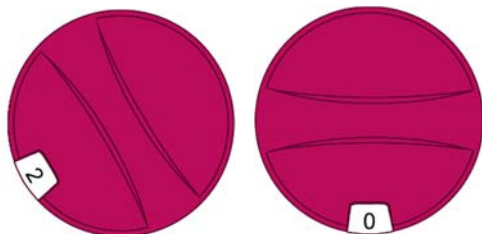

Achtung: Position immer **einrasten** lassen! Bei Zwischenstellungen kann der Durchfluss unterbrochen werden.

2.4 Ablesen der Füllstandsanzeige

Drücken Sie ca. 2 Sekunden auf die Taste unten auf der Füllstandsanzeige. Die Position des brennenden Lämpchens gibt den Füllstand des Behälters wieder:



Hinweise:

Die Lämpchen der Anzeige leuchten zum Test zuerst eines nach dem anderen auf.

Erst nach ca. 10 Sekunden ist es erneut möglich, die Anzeige zu aktivieren.

2.5 Batterieanzeige

Wenn beim Drücken der Taste das Lämpchen über dem Batteriesymbol aufleuchtet, ist die Batterie schwach. Bitte dem Betreuer melden. Die Batterie kann nur in der Werkstatt gewechselt werden.

3 Autonomie

In der folgenden Tabelle geben wir Ihnen eine Übersicht über die Autonomie, welche Sie mit einem vollen Portable idealerweise erreichen.

	Einstellung	Autonomie [Std:min]
Durchfluss (l/min, gasförmig)	0	71
	0.5	32
	1	16
	2	8
	2.5	6:20
	3	5:20
	4	4
	6	2:40
	8	2
	10	1:40
	12	1:20
	15	1

4 Reinigung und Desinfektion

4.1 Reinigung

Die Behälter dürfen nur äusserlich gereinigt oder desinfiziert werden. Es dürfen keine starken Scheuermittel eingesetzt werden. Evtl. etwas Geschirrspülmittel verwenden. Mit Wasser nachwischen.

Achtung: Es dürfen keine entflammaren Lösungsmittel (Aceton, Benzin, Petrol, Nitroverdüner etc.) zur Reinigung verwendet werden (vgl. Sicherheitsmerkblatt)!

4.2 Filzeinlage



Hi Flow Stroller ist im Deckel des Behälterfusses mit einer Filzeinlage ausgestattet. Diese sollte regelmässig gewaschen und getrocknet werden, um Schimmelbildung und Geruchsentwicklung zu vermeiden.

Öffnen Sie dazu mittels des Reissverschlusses die Abdeckung des Behälterfusses, entnehmen Sie die feuchte Filzeinlage und legen Sie eine trockene ein. Ihr Betreuer gibt Ihnen bei Bedarf neue Einlagen ab.

5 Funktionsstörungen

Abhilfemassnahmen zu möglichen Funktionsstörungen entnehmen Sie bitte dem Haupt-Merkblatt Bedienung der Geräte.

CARBAGAS AG

Homecare

Waldeggstrasse 38

3097 Liebefeld-Bern

Tel. 0800 428 428 oder 031 978 78 82 (für Auslandsanrufe)

Fax 031 978 78 03

e-mail homecare.info@carbagas.ch