


Installation Highflow-Versorgung

Die Applikation von Sauerstoff in hoher Dosierung (grösser 6 l/min) erfordert spezifisches Material.

Quellen für die Highflow-Versorgung

Die **stationäre Versorgung** erfolgt idealerweise mittels gekoppelter Reservoirs FREELOX 44 Liter. Damit wird gewährleistet, dass eine ausreichende Menge an Sauerstoff vorrätig ist (rund 80 l). Die Kopplung erfolgt anhand eines Y-Schlauchverbinders (Ref. 170155).


Für die **Mobilität** wird primär der HiFlow-Stroller eingesetzt. Als Alternative können 2 Portables FREELOX 1.2 Liter ebenfalls mittels eines Y-Schlauchverbinders gekoppelt werden.

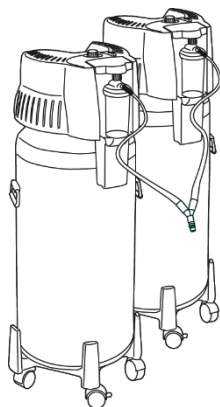

Gekoppelte FREELOX Reservoirs



Gekoppelte FREELOX Portables

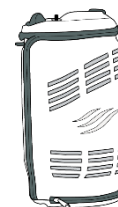

HiFlow Stroller

Hinweise

- Stellen Sie auf beiden Behältern (Reserven oder Portables) dieselbe Dosierung ein, um zu vermeiden, dass sich ein Behälter vor dem anderen leert.
- Kontrollieren Sie regelmässig die Füllstandanzeigen der Behälter, da sie sich bei hoher Dosierung entsprechend schnell leeren.


Zubehör und Verbrauchsmaterial

Zusammenstellung der Artikel, die im Zusammenhang mit Highflow Versorgung eingesetzt werden müssen.




154094

Befeuchterflasche High Flow
(6-15 l/min) Salterlabs

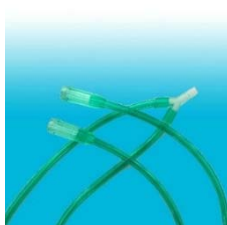

170155

Y-Schlauchverbinder mit 2 Verbindungs-
schläuchen 60 cm
(Salter 1227-2-2-10)

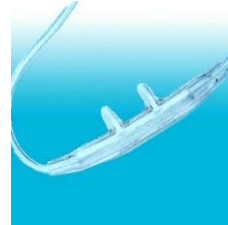

170154

Sauerstoffbrille Adult gebogen
SOFT HIGHFLOW
(Salter 16SOFT-HF-7-25)

Die Verlängerungsschläuche und Verbindungsstücke sind auch für eine Dosierung über 6 l/min ausgelegt. Auch Firesafe® erlaubt einen Flow bis 15 l/min.


Installation approvisionnement à haut débit

L'approvisionnement en oxygène à dosage élevé (au-dessus de 6 l/min) nécessite du matériel spécifique.

Sources pour l'approvisionnement à haut débit

L'approvisionnement stationnaire s'effectue par le biais de Réservoirs FREELOX 44 litres couplés. Il est ainsi garanti que la quantité en oxygène disponible sur place est suffisante (env. 80 l). Le couplage s'effectue par un connecteur de tuyau en Y (Réf. 170155).

Concernant la **mobilité** est utilisé principalement le HiFlow-Stroller. Comme alternative peuvent être couplés 2 Portables FREELOX 1.2 litres également à l'aide d'un connecteur de tuyau en Y.

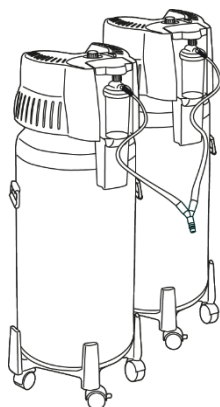

Réservoirs FREELOX couplés



Portables FREELOX couplés



HiFlow Stroller

Remarques

- Réglez de préférence un débit identique sur chaque récipient (stationnaire ou portable) pour éviter d'avoir un récipient qui se vide avant l'autre.
- Contrôlez plus régulièrement le voyant d'autonomie des récipients, car à haut débit, ils se vident d'autant plus vite.


Accessoires et matériel de consommation

Liste des références recommandées pour l'approvisionnement à haut débit.




154094

Humidificateur Haut débit
(6-15 l/min) Salterlabs

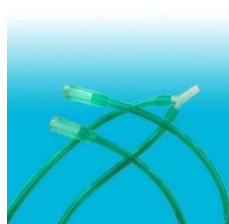

170155

Raccord de tuyau Y avec deux
tuyaux de connexion 60 cm
(Salter 1227-2-2-10)

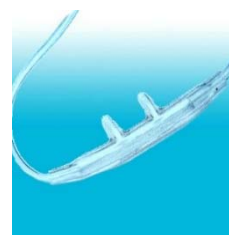

170154

Lunettes d'oxgénothérapie courbes
Adult SOFT HIGHFLOW
(Salter 16SOFT-HF-7-25)

Les tuyaux de prolongation ainsi que les raccords tournants sont dimensionnés pour un dosage au-dessus de 6 l/min. Egalement Firesafe® permet un flux jusqu'à 15 l/min.