

## Kompatibilität von Flüssigsauerstoff-Geräten

Die Sauerstofflieferanten innerhalb der Schweiz bieten Behälter verschiedener Lieferanten an, deren Kompatibilität nur bedingt gewährleistet ist. Zwar sind die Geräte ausnahmslos mit dem sogenannten PB (Puritan Bennett) Anschluss ausgestattet, dessen Baulänge variiert jedoch.

Aus der nachfolgenden Tabelle kann entnommen werden, welche portablen LOX-Behälter sich auf welchen Reservebehältern füllen lassen. Geräte mit verblaster Abbildung sind bedingt kompatibel.

Hersteller	Cryopal	Chart	Chart	Chart
Reserve-Behälter	<b>FREELOX</b>  	<b>COMPANION</b> 	<b>HELIOS H und U</b> 	<b>LIBERATOR</b> 
Cryopal FREELOX Portables				 nur mit Anschluss PB lang
Chart/ Covidien HELIOS Portables	 Umfülldauer 3 - 4 min	 Umfülldauer bis 40 min	 Umfülldauer auf HELIOS U (Universal) bis 3 - 4 min auf HELIOS H 40 sec (60 min warten nach Füllung!)	 Umfülldauer 3 - 4 min
Chart/ Covidien COMPANION Portables			 nur auf HELIOS Universal	
Chart STROLLER, SPRINT			 nur auf HELIOS Universal	
Chart SPIRIT			 nur auf HELIOS Universal	
Chart HiFlow Stroller			 nur auf HELIOS Universal	