

Sicherheitsvorkehrungen Sauerstoff-Druckgas

Hiermit möchten wir Ihnen eine Übersicht zu den grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Handhabung von Sauerstoff Druckgas medicinal vermitteln.

			
<p>Rauchen Sie nie während der Inhalation von reinem Sauerstoff!</p> <p>Erlauben Sie auch anderen Personen nicht, in Ihrer unmittelbaren Umgebung zu rauchen.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass kein offenes Feuer in der Nähe der Flasche oder der Sauerstoffschläuche gelangt.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass sich Gewebe und Kleidungsstücke nicht mit Sauerstoff sättigen können.</p>	<p>Bringen Sie nie Öl oder Fett oder fetthaltige Substanzen in Kontakt mit Sauerstoff.</p> <p>Schmieren Sie nie feststehende Regler mit Öl oder Fett.</p>
			
<p>Versuchen Sie nie, einen Druckgasregler selber zu reparieren!</p> <p>Verwenden Sie nie eine Zange, um feststehende Regler von der Flasche zu lösen.</p>	<p>Schützen Sie Druckgasflaschen vor dem Umfallen, indem sie Sie an der Wand befestigen, oder auf den Fußboden legen.</p>	<p>Öffnen Sie das Flaschen-Absperrventil behutsam, nachdem Sie einen Regler aufgeschraubt haben.</p> <p>Prüfen Sie regelmässig die flaschenseitige Anschlussdichtung und wechseln Sie diese bei Bedarf.</p>	<p>Lüften Sie einen Raum während oder nach dem Austritt von Sauerstoff gut durch.</p> <p>Dies gilt auch für geschlossene Räume, in denen Flaschen unbezogen aufbewahrt worden sind.</p>