

## Füllen eines Hi Flow Stroller

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Füllung eines Hi Flow Strollers auf einer Reserve FREELOX 2. Detaillierte Anweisungen finden sich im CARBAGAS Merkblatt *Bedienung Hi Flow Stroller*.

1



Vor dem Füllen die Schutzkappe vom Füllanschluss der Reserve abnehmen, das Füllfach mit einem fusselfreien Lappen sauberwischen und den Füllanschluss trocknen.

2



Den Füllanschluss des Portables trocknen. Es ist nicht erforderlich, den Boden des Portables zu öffnen.

3



Das Portable sorgfältig senkrecht von oben in die Aussparung der Reserve stellen, leicht hinunter drücken und halten. Dazu gegebenenfalls die Gabel des Auslösemechanismus\* etwas absenken.

4



Leichten Druck auf das Portable aufbringen und halten. Das Gerät rastet nicht ein.

5



Den Entlastungshebel am Portable horizontal ca. 90° umklappen und füllen.

6



Füllen, bis der weiße Nebel schwallweise aus den Lüftungsschlitzen der Reserve quillt: Das Portable „hustet“. Das Gerät sofort nach dem ersten „Husten“ von der Reserve trennen.

7



Nach dem Füllen zuerst den Entlastungshebel zurück klappen und dann das Portable gegebenenfalls durch leichten Zug am Tragegurt von der Reserve lösen.

8



Prüfen Sie den Füllstand anhand der Füllstandsanzeige.

\* lesen Sie bitte nach im Dokument DE-25.051d Bedienung Hi Flow Stroller.

Ihr Kontakt bei CARBAGAS:  
Care Center Homecare, Tel. 0800 428 428