

Füllen eines FREELOX Portables

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Füllung eines Portables auf einer Reserve FREELOX 2. Detaillierte Anweisungen finden sich im CARBAGAS Merkblatt *Bedienung Portable FREELOX*.

1



Vor dem Füllen des Portables dessen Bodenabdeckung entfernen. Allenfalls die nasse Filzeinlage gegen eine trockene austauschen.

2



Die Schutzkappe vom Füllanschluss der Reserve abnehmen. Das Füllfach mit einem fusselfreien Lappen sauberwischen und den Füllanschluss trocknen.

3



Den Füllanschluss des Portables trocknen.

4



Das Portable sorgfältig senkrecht von oben in die Aussparung der Reserve stellen. Dazu gegebenenfalls die Gabel des Auslösemechanismus* etwas absenken.

5



Leichten Druck auf das Portable aufbringen und halten. Das Gerät rastet nicht ein, es wird jedoch bereits durch den Druck auf den abgesenkten Füllhebel (Schritt 6) in Position gehalten.

6



Den Entlastungshebel am Portable absenken und füllen. Max. Hebel-Neigung: siehe Etikette am Gerät. Die Bildung von weissem Nebel ist normal.

7



Füllen, bis der weisse Nebel schwallweise aus den Lüftungsschlitzen der Reserve quillt. Das Portable „hustet“.

8



Nach dem Füllen das Portable gegebenenfalls durch leichten Zug am Tragegriff lösen. Den Füllstand anhand der elektronischen Füllstandsanzeige kontrollieren.

* lesen Sie bitte nach im Dokument DE-25.050d Bedienung Portable FREELOX.

Ihr Kontakt bei CARBAGAS:
Care Center Homecare, Tel. 0800 428 428