

Füllen eines Portables SPIRIT

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Füllung eines Portables SPIRIT auf einer Reserve FREELOX 2. Detaillierte Anweisungen finden sich im CARBAGAS Merkblatt *Bedienung Portables SPIRIT*.

1



Vor dem Füllen die Schutzkappe vom Füllanschluss der Reserve abnehmen, das Füllfach mit einem fusselfreien Lappen säubern und den Füllanschluss trocknen.

2



Den Füllanschluss des Portables trocknen.

3



Das Portable sorgfältig senkrecht von oben in die Aussparung der Reserve stellen, leicht hinunter drücken und halten. Dazu gegebenenfalls die Gabel des Auslösemechanismus* etwas absenken.

4



Leichten Druck auf das Portable aufbringen und halten. Das Gerät rastet nicht ein.

5



Den Entlastungshebel am Portable horizontal ca. 90° umklappen und füllen.

6



Füllen, bis der weisse Nebel schwallweise aus den Lüftungsschlitzen der Reserve quillt. Das Portable „hustet“.

7



Nach dem Füllen zuerst den Entlastungshebel zurück klappen und dann das Portable gegebenenfalls durch leichten Zug am Tragegurt von der Reserve lösen.

8



Den Füllstand mittels der eingebauten Federwaage kontrollieren.

* lesen Sie bitte nach im Dokument DE-25.019d Bedienung Portable SPIRIT.

Ihr Kontakt bei CARBAGAS:
Care Center Homecare, Tel. 0800 428 428