

Rundum gut versO₂rgt
auf dem Weg der Besserung



Produktmerkmale

- Ventil mit integriertem Druckminderer
- Einsatzbereit mit nur einem Handgriff
- Druckanzeige in gut sichtbarer Position vis à vis zum Anwender
- Permanente Inhaltsanzeige zeigt den Fülldruck auch bei geschlossenem Ventil
- Präziser und konstanter Durchfluss
- Ventilschutz in Kombination mit ergonomisch geformtem Tragegriff
- Sichere und rutschfeste Betaufhängung
- Grosser und gut lesbarer Produktaufkleber mit allen wichtigen Benutzerhinweisen
- Einfache Reinigung und Desinfektion durch optimiertes Design
- Zum Einsatz am MRT geeignet (getestet bis 3 Tesla)
- CE-Kennzeichnung gemäss der Richtlinie 93/42/EWG (MDD)

Technische Daten

Fülldruck	200 bar (bei 15°C)
Betriebsdruck	bis 200 bar (bei 15°C)
Einstellbarer Durchfluss	12 Stufen / 0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 15 l/min
Geräteanschluss (Druck)	gemäss CARBAMED / DIN-Standard (3,6 bis 5,5 bar)
Lager- bzw. Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Kontrolle und Wartung	durch CARBAGAS AG

Erhältliche Systemgrössen

Geometrisches Volumen (l)	Füllvolumen* (l)	Kopfdurchmesser (mm)	Zylinderdurchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Gewicht leer* (kg)	Gewicht voll* (kg)	Artikelnummer	Geräteanschluss
5	1,055	111	140	660	6,4	7,8	M1001S05F2AC01	SAUERSTOFF MED FLA-S OYAN 5/200 CARBA
							M1001S05F2AD01	SAUERSTOFF MED FLA-S OYAN 5/200 DIN
10	2,111	140	140	1,175	13,5	16,3	M1001S10F2AC01	SAUERSTOFF MED FLA-S OYAN 10/200 CARBA
							M1001S10F2AD01	SAUERSTOFF MED FLA-S OYAN 10/200 DIN

*ca. Angaben



Die neue Generation von intuitiven
Sauerstoffapplikationssystemen



Oyan

Designed to care

Inspiziert von Beobachtungen und Bedürfnissen aus Ihrer täglichen Praxis, haben wir mit Oyan™ ein mobiles und benutzerfreundliches Sauerstoffapplikationssystem entwickelt, mit dem Anspruch, Sie im Klinikalltag bei der Pflege Ihrer Patienten bestmöglichst zu unterstützen.

Arzneimittel

Bezeichnung:

Sauerstoff medicinal Carbagas 200 bar, Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet.

Wirkstoff:

Sauerstoff 100%.

Name und Adresse der Zulassungsinhaberin:

CARBAGAS AG, CH-3073 Gümligen.

Anwendungsgebiet:

Sauerstofftherapie.

Abgabekategorie:

E



off
verdichtet
ic, kann bei
n,
en oder verdichten,
raten anhalten
gibt (i- und Nitro-
il besitzigen, wenn
in OT aufbewahren.

F912165 02.17 Rev. 1

2

GEFAHR
DANGER

UN 1072
EG-Nr. 231-956-9

200
Där

Oxy
Oxygen

- Contient un gaz sous pression sous forme comprimée
- Préférer protéger ou aggraver
- Eviter à l'écoulement
- Ne fumer, ni griller, ni lire ni téléphoner pendant l'utilisation
- Si une étincelle, allumer la flamme ou le feu
- Stocker dans un endroit
- Utilisation en
• Éviter l'obstruction
• Ne pas utiliser
• Ne pas utiliser
• Ne pas utiliser
• Ne pas utiliser
• Ne pas utiliser
• Ne pas utiliser
• Ne pas utiliser
• Ne pas utiliser

inweisung Ventil

verbleibende Sauerstoffmenge für die vorgesehene Verwendung
fluss durch Drehen des Durchflussreglers

inischen Patienten
n Schlauch an den Ausgang an
uchflussregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Einstellung
fluss der Sollwert Sauerstoff anzeigt

Sekundenschnell einsatzbereit



Sichere
Behandlung
durch einfache
Bedienbarkeit

SICHER

“Oyan™ bietet meinen Patienten und
mir ein hohes Mass an
Sicherheit und Zuverlässigkeit.“

Kinderarzt

Kein Auf- und Abschrauben
von Druckminderern mehr erforderlich

Sekundenschnelle und präzise
Applikation **durch nur einen Handgriff**

Klare Sichtbarkeit
der eingestellten Durchflussmenge



gène
comprimé
pression, peut
être de la douleur
ou un inconfort
consistant
et des malaises
circulaires.
elle et racovale
de la douleur
et sans danger
et sans effet
situation en
difficile avec la
de la douleur
cette
tourner avec
revenir normale
mer la valve
en utilisation

it für eine optimale Sauerstoffve



Optimaler
Patiententrans-
port unter allen
Bedingungen

MOBIL

“Für Transporte benötigen wir ein sofort einsatzbereites und mobiles System, vor allem wenn es mal schnell gehen muss.“

Pflegedienstleitung

Einsatzbereit
im Handumdrehen

Permanente Inhaltsanzeige
in bar vis à vis zum Anwender
zeigt den aktuellen Flaschendruck
bzw. Inhalt permanent an

Integrierte, rutschfeste
und **sichere** Betaufhängung

Schnelles und direktes Verbinden
von medizinischen Geräten



rsorgung Ihrer Patienten.



Effizientes
Arbeiten mit
medizinischem
Sauerstoff

EFFIZIENT

“Mit den Oyan™ Systemen spare ich mir
Zeit und kann mich vermehrt auf
meine Kernaufgaben konzentrieren.“

Medizinisches Gasmanagement

Ergonomischer Systemkopf
mit integriertem Druckminderer

Handlich und leicht zu tragen

Permanente Anzeige
des verfügbaren Restdruckinhalts





Air Liquide widmet sich seit mehr als 120 Jahren der Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen, um den Herausforderungen einer vollumfänglichen Versorgung mit medizinischen Gasen zu begegnen.

Unsere innovativen Lösungen und anspruchsvollen Sicherheitsstandards sorgen dafür, dass medizinische Fachkräfte - in rund 15.000 Krankenhäusern und Kliniken in über 35 Ländern der Welt - das erhalten, was sie brauchen, um die Gesundheit und das Leben von Patienten zu schützen.

Diese medizinischen Fachkräfte sind nicht nur unsere Kunden, sondern vielmehr auch wertvolle Partner an unserer Seite. Wir entwickeln unsere Produkte auf der Grundlage ihrer Beobachtungen und Bedürfnisse aus der Praxis und hören der Krankenschwester, die sich der Pflege ihrer Patienten widmet, genauso zu wie dem Sanitäterteam, das Leben rettet, oder dem Arzt, der den Patienten sichere Behandlungsoptionen anbietet.

Wir kombinieren ihre Erfahrungen und Bedenken mit unserer jahrzehntelangen Innovationskompetenz. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Systemen für die Versorgung mit medizinischen Gasen. Air Liquide hat Oyan™ entwickelt, weil uns die medizinischen Fachkräfte am Herzen liegen, die sich täglich um Patienten kümmern. Unsere medizinischen Gase erfüllen die Bedürfnisse von Gesundheitsdienstleistern und spielen eine wichtige Rolle im Kontinuum der Pflege - von der Ersten Hilfe bis zur Operation und auf der Intensivstation.

Kontakt

CARBAGAS AG
Hofgut
3073 Gümligen
Fon: +41 31 978 78 79
www.healthcare.carbagas.ch
e-mail: medgas@carbagas.ch



Air Liquide Healthcare versorgt Kunden mit medizinischen Gasen, Home Healthcare Serviceleistungen, medizinischem Equipment und Spezialinhaltsstoffen. Mit der Unterstützung von 16.400 Mitarbeitenden beliefert Air Liquide Healthcare weltweit mehr als 15.000 Krankenhäuser und 1,9 Mio. Patienten.